

解析レポート取得サイトリニューアルのお知らせ

- URL が変更になりました。
(新 URL : <https://fc.i-securedeliver.jp/suzuken/login>)
- 画面レイアウトが更新され見やすくなりました。



※取扱説明書には旧サイトの画面、操作方法が記載されております。

本誌を見て新しい取得サイトにアクセスしてご使用ください。

※2024年12月以降は旧サイトにアクセスすると新サイトに自動的に移動する場合があります。

(旧 URL : <https://i-securedeliver.jp/sd/suzuken/jsf/login/user/login.jsf>)

解析結果レポートの取得

投函された記録器は、郵便到着後、解析センターにてデータの解析と判読を行います。解析センターでの解析作業終了後に専用 Web サイトにアクセスいただくと、アップロードされた解析結果レポート (PDF データ) を取得することが可能となります。

■受付情報の確認

①解析センターに郵送到着後、下記の解析レポート取得サイトにアクセスしてください。


注 記

記録器の投函から解析センターへの配達日数は、郵便局にお問い合わせいただくか、郵便局のホームページをご参照ください。

《解析レポート取得サイト》

URL <https://fc.i-securedeliver.jp/suzuken/login>

もしくは

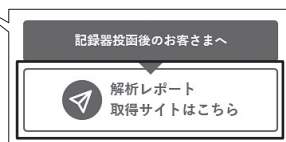

②簡易ガイドに貼り付けてあるログイン ID・パスワード情報を使用して解析レポート取得サイトにログインしてください。



解析レポート取得サイト ログイン画面

③データの受付が終了するとメール一覧画面に受付情報データ (件名: 受付情報) が表示されます。

件名欄に受付情報 (受付 No.、返却予定日) が表示されますので、解析結果レポート (PDF データ) の取得日の目安としてください。

また、ここでデータをダブルクリックしてください。



注 記

受付情報PDFデータをダウンロードする前は、メール一覧画面のデータは、(件名: 受付情報 ダウンロード期限: ↓)と表示されます。

④メール一覧画面に表示された受付情報データを選択すると受付情報画面が開きます。



受付情報 PDF データがダウンロードできます。ダウンロードボタンを押すと、ファイルのダウンロードが開始されます。以下は、受付情報 PDF の例です。

SimpleHolter 受付情報	
以下のデータを受け付けました。	
受付No	12345672
受付日	2024/05/23
患者名	テストデータ
患者ID	12345678
シリアルナンバー	12340002
記録開始日時	2024/05/22 10:00:00

このデータの解析結果レポートは
2024/05/29
にアップロード予定です。

注 記

受付情報PDFデータをダウンロードした後は、メール一覧画面のデータは、(件名：受付情報ダウンロード期限：✓)と表示されます。

■解析結果レポートの取得

⑤解析が終了するとメール一覧画面にデータ (件名：解析レポート) が表示されます。ここでデータをダブルクリックしてください。



メール一覧画面 (解析終了時)

注 記

解析結果レポートはメール配信されません。受付情報を目安に解析レポート取得サイトにアクセスし、ご確認をお願いします。

⑥メール一覧画面に表示された解析結果レポートデータを選択すると解析レポート画面が開きます。



ダウンロードボタンを押すと、解析結果レポートがダウンロードされます。ダウンロードした PDF データをパソコンもしくは HDD などの外部メディアに保存してください。

注 記

解析結果データの保管期間は、14日間です。保管期間を過ぎた場合、メイン画面から消去されますのでご注意ください。保管期間経過後のデータを再表示させたい場合は解析センター(TEL 0120-81-3989)へご連絡ください。

⑦ダウンロードした解析結果レポートの内容をご確認ください。

■ログアウト

⑧メイン画面上部に表示されている ユーザーアイコンをクリックし、ログアウトを押してください。

